



GEBRAUCHSANWEISUNG für den Zahnarzt / Zahntechniker (IFU)

CAM-Wachsrohlinge Farbe : weiß, grau etc. Artikelnr : DR 000 900 HD 830-

Zweck: zur Herstellung von Wachgerüsten für K & B- Zahnersatz mit Hilfe eines CAD / CAM Systems

Lieferform:

Durchmesser 98,5 mm Höhe 10 -22 mm

1. Allgemeines

Die Wachsrohlinge können mit verschiedenen Frässystemen verarbeitet werden.

2. Lagerung

Vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

3. Einsatzgebiet

Waxblancs sind nicht zum Einsatz im Mund gedacht. Das Material kann verwendet werden um Kronen-und Brückengerüste herzustellen.

Da es rückstandsfrei verbrennt, eignet es sich zur Herstellung für alle Gussformen in der Gießtechnik und Keramikpresstechnik.

4. Verarbeitung

Die gefrästen Wachskerüste können mit geeigneten Fräsern oder Trennscheiben aus dem Rohling herausgetrennt werden.

5a. Anstiften von Gusskanälen

Das Ansetzen und Auswahl der Stärke der Gusskanäle richtet sich entsprechend der zur Anwendung kommenden Geräte und Legierungen bzw. Presskeramik.

5b. Einbetten

Silikonmuffel bzw. Metallmuffel mit Liner auskleiden. Einbettmasse unter Vakuum Anmischen und Einbetten unter Beachtung der Gebrauchsanweisung der Herstellerangabe verwendeten Einbettmassen und Legierungen!

6. Entsorgungshinweise

Reste können für wachsubliche Arbeiten weiterverwendet werden, jedoch ohne Verunreinigungen. Da es wasserunlöslich ist, kann die Entsorgung im normalen Hausmüll erfolgen.



Technische Datenblatt : Waxblanks . DR 000 900 HD 830-



Für das virtuelle Fräsen, Modellieren und Gießen von Kronen und Brücken. Sie eignen sich ideal für die Herstellung von zahntechnischen Wachsgerüsten für die Gusstechnik sowie Presskeramiktechnik.

Technische Daten:

Chemische Zusammensetzung:	Synthetisches Wachs	
Geruch:	Geruchslos	
Farbe:	weiß, grau, blau	
Tropfpunkt:	100 -130 °C	
Dichte:	0,92-0,97 g/cm ³	
Flammpunkt:	Nicht anwendbar	
Löslichkeit im Wasser:	unlöslich	
Säurezahl (mg KOH/g)	Sollwert: 0 0	ISO 2114

Best.-Nr. DR 000 900 HD 830-20	Wax Blank weiß	98.5 x 20 mm
Best.-Nr. DR 000 950 HD 830-20	Wax Blank grau	98.5 x 20 mm
		etc

Die wachsgefrästen Konstruktionen aus dieser Wachsblank sind für eine kurze Verweildauer im Mund des Patienten zur Anprobe ausgelegt.

Die „Prothese“ darf im Mund platziert werden, um wichtige Punkte wie Mittellinie, Lachlinie, etc. zu definieren. Eine solche Anprobe sollte nicht länger als zwei Stunden benötigen, unbedingt davor desinfizieren.

Desinfektion sollte nur durch „Aufpinselung“ erfolgen, nicht sprühen, da Sprühen auch Deformationen hervorrufen kann.

20.1.2013

Version 1.2 überarbeitet 5.7.2013



Nordstraße 3
D-86381 Krumbach
Tel: +49 08282 800 44-0
Fax: +49 08282 800 44-33
info@morsa.de; www.morsa.de